



Navn på delene

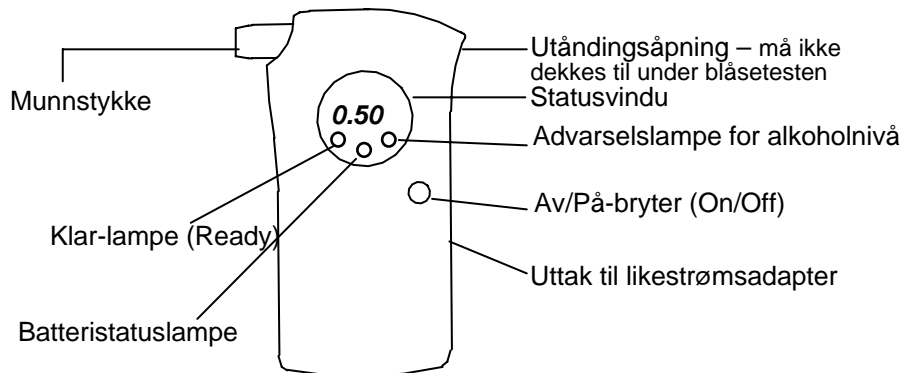

Skifte av batterier

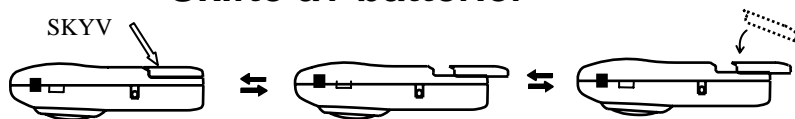

Bruksanvisning

- Slå på apparatet med av/på-bryteren.
 - Alkotesteren viser nedtelling fra 200 til 0 i statusvinduet. Dette er en "oppvarmingsrutine" som skal klargjøre alkotesteren til bruk.
- Når du hører en pipelyd og READY-lampen lyser grønt, blåser du jevnt inn i munnstykket inntil det piper igjen. Da kan du slutte å blåse.
 - Hvis du ikke blåser innen 30 sekunder når READY-lampen lyser, vises OFF i statusvinduet og testeren kan slås av.
 - Alkotesteren vil ikke alltid aktiveres ved lav promille (dersom alkoholkonsentrasjonen er under 0,10 mg/ml promille). Den viser i stedet 0,00.
- Testresultatet vises med 3 siffer i 15 sekunder etter at det røde og grønne lyset har blinket samtidig i 4 sekunder.
 - Dersom resultatet er høyere enn 0,50 mg/ml promille (standard innstilling), lyser en rød varselampe og en "alarm" lyder.
- Til slutt vises OFF i vinduet, og apparatet kan slås av.
- Ønskes ytterligere testing, gjentas punkt 1 til og med 3.
- Vent i minst 2 minutter mellom hver test.

Forholdsregler

- Vent i 30 minutter før du tester deg etter at du har drukket.
 - Det tar omlag 30 minutter før alkoholen tas opp i blodet fra fordøyelsessystemet og munnhulen er fri for alkoholrester.
- Unngå testing i sterk vind eller i lukket rom med dårlig luft.
- Når batterilampen (BAT LOW) lyser, bør batteriet skiftes (9V alkalisk).
- Ikke blås sigarettøyk eller væske inn i måleren. Vent i ett minutt med å teste deg etter en røyk og minimum 20 minutter etter alkoholinntak.**
- Selv om CA4000 analyserer alkoholkonsentrasjonen i blodet svært presist, **skal ikke** CA4000 benyttes til å kombinere inntak av alkohol og bilkjøring.
- Oppbevar testeren ved 0 – 40 °C og utenfor barns rekkevidde.
- Ved normal bruk bør CA4000 omkalibreres etter 6 – 12 måneder, eller etter 800 målinger, for å sikre et presist resultat.
- Ikke la CA4000s biladapter bli stående i sigaretteneren.
- For omkalibrering, kontakt oss.

Spesifikasjoner

Dimensjon	120 x 60 x 25 mm
Vekt	200 gram
Batteri	9V alkalisk
Sensor	Meget følsom oksidhalvleder
Oppvarmingstid	20 sekunder
Responstid	3 sekunder
Brukstemperatur	10 - 40 °C
Presisjonsnivå	± 0,10 mg/ml (promille) per 1,00 mg/ml (promille)
Kalibrering	BAC-simulator

Garanti og service

Produsenten garanterer for produktet i 2 år fra kjøpedato. Garantien dekker produksjonsfeil eller materialfeil (unntatt kalibrering) som måtte oppstå ved normal bruk. Produsenten forplikter seg til å erstatte eller reparere produktet forutsatt at det returneres med kvittering. Garantien gjelder ikke dersom produktet er åpnet eller forsøkt reparert. Kontakt i Norge, tlf: +47 2274 8840. –www.ttmicro.no

Juridisk informasjon

TT Microtrading, distributør, forhandlere, agenter, m.fl., kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av eventuelle feil ved måleresultatet.

TT Microtrading, distributør, forhandlere og agenter fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap som følge av feil måleresultat eller feil bruk.

Føreren har selv ansvaret for at bilkjøring ikke foregår i alkoholpåvirket tilstand.